



Handleiding Bitje


Welkom, super dat je hebt gekozen voor ons product om je tanden witter te kunnen maken.

Hieronder vind u een uitgebreide handleiding om aan de slag te gaan met onze bitjes op pasvorm. Deze zijn ideaal te combineren met onze tandbleeksets. Veel plezier!


1 Open onze bitjes set verpakking.

2 Neem een kom of een schaalte en vul deze met kokend water. Nadat je de kom of het schaalte gevuld hebt, laat deze dan afkoelen gedurende 7 a 8 minuten.

3 Dompel het bitje volledig in het water gedurende 15 seconden.

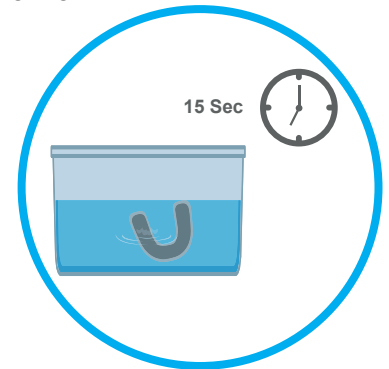

4 Nu kun je het bitje voorzichtig in je mond plaatsen. Let er wel goed op dat deze nog te heet aanvoelt. **Let op: het bitje moet niet nog te heet zijn!**

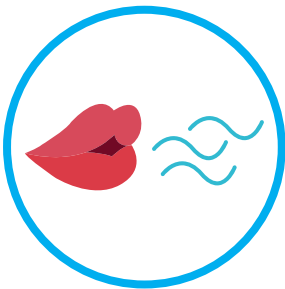

5 Vervolgens dien je je mond te sluiten en alle lucht te verwijderen tussen het bitje en de tanden door goed te zuigen. Zo kun je het bitje goed op maat maken en sluit deze goed aan op uw tanden.

6 Druk nu voorzichtig met je vingers op de buitenkant van het bitje en wacht vervolgens 20 seconden.

7 Nu kun je jouw bitje uitnemen en deze gedurende 15 seconden afspoelen onder een koude kraan.



8 Het bitje is klaar voor gebruik! Nu kun je de bleekgel gelijkmatig over het bitje verdelen.

9 Herhaal deze stappen voor een ander bitje.

Bewaren: U kunt het beste onze bitjes bewaren op een koele, droge plek.

Waarschuwing: Buiten bereik van kinderen houden. Niet doorslikken. Niet geschikt voor kinderen onder de 16 jaar.

Wanneer kun je resultaten verwachten?

Veel mensen zien al na 3 dagen verschil. Bijna alle mensen zien na twee weken dat zij duidelijk wittere tanden hebben